

Westfalia Bedienungsanleitung

Nr. 109730

Zeckenzange für Mensch und Tier

Sommerzeit ist Zeckenzeit, und damit Sie Natur pur richtig genießen können, erhalten Sie von uns diese praktische „SOFORTHILFE“ Die Zeckenzange hilft Ihnen die Zecke gefahrlos zu entfernen, beugen Sie so gefährlichen Krankheiten vor (bei falscher Entfernung z.B. mit Öl können die Krankheitserreger in die Blutbahn gelangen). Einfach in der Anwendung, klein und handlich, ca. 10 cm lang.

Anwendung:

Knopf drücken, Zange an die Zecke anlegen und langsam nach links drehen (ca. 2-3 Umdrehungen), so läßt sich die Zecke leicht entfernen. Bitte den Arzt aufsuchen, wenn sich eine lokale Reaktion (Rötung, etc.) zeigen sollte, oder wenn Sie sich in einem Gebiet befinden, in dem FSME (Hirnhautentzündung) häufig auftritt.

Art.-Nr. 67 22 53